

MASQUE CHIRURGICAL TYPE IIR

Masque chirurgical type IIR

Masque avec élastiques non agressifs et confortables.

- Tissus non-tissé sans fibre de verre
- Barette nasale double âme métallique, améliorant l'application et la tenue sur le visage, antibuée
- Média haute filtration ; polypropylène
- Matières douces et non irritantes, sensation du coton



CE



1- Caractéristiques

Dispositif médical de classe I :

- Domaine médical, industriel, BTP, administratif, commercial

Couleur :

- Bleu

Descriptif :

- À usage unique et non stérile
- Norme EN 14683 + AC2019, Type IIR et norme CE
- Sans latex
- Tissus non-tissé 100% Polypropylène
- La durée du port du masque est de 4h

2- Application du masque



Se laver les mains

Mettre les élastiques derrière les oreilles

Pincer le bord rigide au niveau du nez, abaisser le masque en dessous du menton et ne plus le toucher

3- Conseils d'utilisation

- Se laver les mains avant de mettre le masque
- Positionner le haut du masque sous les yeux et le bas du masque sous le menton (recouvrir la bouche et le nez)
- La partie bleue du masque est la face extérieure, la partie blanche est la face intérieure (contre le visage)
- Pincer la barrette nasale métallique, cette dernière sert également d'antibuée
- Ne plus toucher ni le masque, ni le visage une fois le masque installé
- Ne pas changer de côté après utilisation
- Ne pas porter le masque plus longtemps que la durée conseillée (4h)
- Se laver les mains avant de retirer son masque
- Retirer le masque par les élastiques pour le jeter dans une poubelle ou un sac hermétique.

Conseils de stockages :

- à conserver dans la boîte d'origine
- ne pas stocker au soleil
- ne pas stocker dans une pièce humide
- ne doit pas subir d'exposition à des variations de températures importantes.

Réf	Description	Conditionnement
00409	175 x 90 mm	50 unités / boîte 60 boîtes / carton



G R O U P

Your healthcare solution supplier

14, Rue du bois L-3980 Wickrange LUXEMBOURG



contact@oplusgroup.lu



+352 26 62 06 04